

Haaravyö pyörätuoliin HAR1

CE merkitty
Basic UDI-DI: 643007748HAR199
UDI-DI: 6430077480032
GMDN koodi: 13356



Haaravyö on tarkoitettu käytettäväksi pyörätuoliin/geriatriseen tuoliin estääkseen istujan liukumisen pois tuolilta. Kaikenlainen muu käyttö on kielletty.

Tukeva ja kestävä haaravyö tuo turvaa pyörätuolin tai geriatrisen tuolin käyttäjille. Se toimii turvavyön tavoin ja T-muotoisena estää käyttäjää liukumasta istuimelta. Haaravyössä on pikalukitus, joten sen käyttö on helppoa ja nopeaa. Solumuovi tekee vyöstä pehmeän ja mukavan. Materiaali on vedenpitävää ja todella helppo pyyhkiä ja pestä puhtaaksi. Yksi koko sopii kaikille, vyössä on pitkät säätövarat.

Asennusohje:

Aseta haaravyö istuimelle, leveämpi pää tulee eteen.

Haaravyö HAR1 laitetaan tuolille alempi turvavyönauha kiinnitetään tuoliin kuvan mukaisesti.

(kuva: haaravyö alussa)



Henkilö istuu tuolille ja haaravyön ylempi turvavyönauha kierretään henkilön vatsan kautta tuolin taakse siten, että lukkopiuha kierretään myös pyörätuolin pystyputken ympäri kertaalleen. Varotoimenpide, ettei tuolissa istuja saa pyöritettyä lukkoa kohdalleen.

Video youtubessa: <https://youtube.com/shorts/P6TVN3LpIFc>

(kuva: haaravyö kiinnitettynä)



(kuva: haaravyö takaa)



Painorajoitus: 200 kg

Pesulämpötila: 80 C,
pestään pesupussissa lukot suljettuna, pehmuste
poistettava ennen pesua.

Uudelleenkäyttö:

Ennen uudelleenkäyttöä täytyy silmämääräisesti tarkistaa, ettei ompelusaumoissa, materiaalissa ja tikkauslangoissa ole ratkeamia tai reikiä. Jos sellaisia löytyy, niin tuote on hävitettävä.

Rikkinäinen ja loppuunkäytetty tuote hävitetään sekajätteenä

Jos toimitus on vahingoittunut tai puutteellinen, älä ota tuotetta käyttöön. Ota välittömästi yhteyttä meihin.